

**ਹੀਮਾ-ਸਕਰੀਨ™ II ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ (ਸਾਈਡ 1)
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ**

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

- ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਕ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਨਾ ਲਵੋ।
- ਆਪਣੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ (C) ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਫਲ ਜਾਂ ½ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਸ ਨਾ ਲਵੋ।
- ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਜੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ (ਸਾਈਡ 2) 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ:

- ਕੇਵਲ ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਫੁਆਇਲ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਦ (ਸੀਲ) ਨਾ ਕਰੋ।
- ਫੁਆਇਲ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਟੱਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ।

**ਹੀਮਾ-ਸਕਰੀਨ™ II ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ (ਸਾਈਡ 2)
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ**

- 1) ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ (ਸਾਲ/ਮਹੀਨਾ/ਮਿਤੀ) ਮਿਤੀ ਲਿਖੋ।
- 2) ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਫਲੈਪ ਹੇਠ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ # 1 ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ # 2 ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
- 3) ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਪ # 1 'ਤੇ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਿਖੋ।
- 4) ਬਾਉਲ (ਜਿਸ 'ਚ ਟੱਟੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਆਇਲਟ ਨੂੰ ਫਲੋਸ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਟੁਆਇਲੈਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 'ਚੋਂ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- 5) ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਸਾਫ਼, ਖੁਸ਼ਕ, ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੱਟੀ ਟੁਆਇਲਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਿਓ।
- 6) ਫਲੈਪ # 1 ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਟੱਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਲ੍ਹਾ ਵਰਤੋ। ਜਗ੍ਹਾ # 1 'ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤੀਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਗ੍ਹਾ # 2 'ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਲੈਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- 7) ਨਮੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਟੁਆਇਲੈਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ (ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ) ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
- 8) ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫੁਆਇਲ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਭ ਛੱਡੋ।
- 9) ਫਲੈਪ # 2 ਅਤੇ ਫਲੈਪ # 3 ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨੰਬਰ 3-8 ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਹਰਾਓ। ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਤੀ ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ।